

再使用禁止

## エクアシールド・オスルアーロックコネクタ

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

### 【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済みディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で再使用できない。




### 【使用目的又は効果】

本品はメスルアーロックコネクタ、その他の器具等に含まれる薬剤を他の薬剤容器・器具へ閉鎖した状態で移すために使用する。

### \*\*【使用上の注意】

本品の接続口(セプタム)には指定の医療機器「販売名:エクアシールド・メスルアーロックコネクタ(届出番号 23B1X90001000013)」を使用すること。

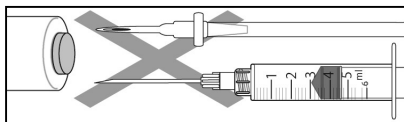

### \*【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

1. 薬液調整用針「販売名:エクアシールド・メスルアーロックコネクタ(届出番号 23B1X90001000013)」との接続方法

- 本品の赤色マークとメスルアーロックコネクタの赤色マークを合わせて接続する。
- メスルアーロックコネクタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品を切り離す場合、本品のロッキングレバーを押して取り外す。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。
- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。
- 脂肪乳剤及び明脂乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤又はアルコールなどの溶解補助剤等を含む医薬品を混注又は吸引

する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタのひび割れに注意すること。

- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 使用前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

#### 【有効期限】(自己認証による)

### \*【包装】

30個/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 【製造販売業者】

アルゴキアシステム株式会社  
愛知県豊田市花園町屋敷1-9-8番地2  
TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528  
ホームページ <http://www.argocs.com/>

#### 【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)  
エクアシールド メディカル Ltd.

### \*【総代理店】

株式会社トーショー  
東京都大田区東糀谷3-8-8  
TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547  
ホームページ <http://www.tosho.cc/>