

再使用禁止

## エクアシールド・オスルアーロックコネクタ

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

### 【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済みディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で再使用できない。



- 本品は DEHP 等の可塑剤を含まない。
- 本品はラテックス成分を含まない。

### 【使用目的又は効果】

本品はメスルアーロックコネクタ、その他の器具等に含まれる薬剤を他の薬剤容器・器具へ閉鎖した状態で移すために使用する。

### 【使用上の注意】

薬液調整用針「販売名: エクアシールド・メスルアーロックコネクタ (届出番号 23B1X90001000013)」は本品専用とすること。

### \*【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

1. 薬液調整用針「販売名: エクアシールド・メスルアーロックコネクタ (届出番号 23B1X90001000013)」との接続方法

- 本品の赤色マークとメスルアーロックコネクタの赤色マークを合わせて接続する。
- メスルアーロックコネクタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品を切り離す場合、本品のロッキングレバーを押して取り外す。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。
- 使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。
- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤又はアルコールなどの溶解補助剤等を含む医薬品を混注又は吸引する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタのひび割れに注意すること。
- ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。

- 接液部を汚染させないこと。
- 使用直前に開封し、開封後は速やかに使用すること。
- 包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】(自己認証による)

### \*【包装】

30 個/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 【製造販売業者】

アルゴキョアシステム株式会社  
愛知県豊田市花園町屋敷 1 9 8 番地 2  
TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528  
ホームページ <http://www.argocs.com/>

#### 【製造業者】

Equashield Medical Ltd. (イスラエル)  
エクアシールド メディカル Ltd.

### \*【総代理店】

株式会社トーショー  
東京都大田区東桃谷 3-8-8  
TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547  
ホームページ <http://www.tosho.co/>