

再使用禁止


## エクアシールド・シリンジュニット

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

本品は滅菌済みディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で再使用できない。

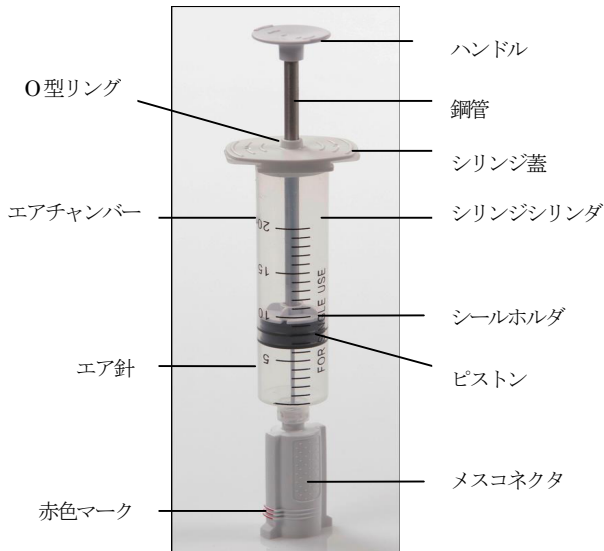

型番	容量 (mL)	最小目盛り (mL)	デットスペース (mL)	針の外径 (ゲージG)	針の長さ (mm)
SU-1/2	1	0.01	0.07	19	30
SU-3/2	3	0.1	0.07	19	30
SU-5/2	5	0.2	0.07	19	30
SU-10/2	10	0.2	0.07	19	30
SU-20/2	20	1	0.08	17	30
SU-35/2	35	1	0.08	17	30
SU-EZ60/2	60	1	0.08	17	30

- 本品のメスコネクタに針を内蔵する。
- 本品は DEHP 等の可塑剤を含まない。
- 本品はラテックス成分を含まない。

### 【使用目的又は効果】

本品はバイアルアダプタ、スパイクアダプタ、保護プラグ、オスルーロックコネクタ、その他の器具等に含まれる薬剤を他の薬剤容器・器具へ閉鎖した状態で移すために使用する。

### 【使用上の注意】

注射筒・針用アダプタ「販売名：エクアシールド・オスルーロックコネクタ (届出番号 23B1X90001000014)」、容器アダプタ「販売名：エクアシールド・バイアルアダプタ (届出番号 23B1X90001000016)」、薬液調整用器具「販売名：エクアシールド・スパイクアダプタ (届出番号 23B1X90001000015)」、保護栓「販売名：エクアシールド・保護プラグ (届出番号 23B1X90001000012)」は本品専用とすること。

### \*\*【使用方法等】

本品の使用前に製造業者の「取扱説明書」を確認すること。

#### 1. 容器アダプタ「販売名：エクアシールド・バイアルアダプタ (届出番

号 23B1X90001000016)」との接続方法

#### ①薬剤をバイアルから吸引する場合

- バイアルアダプタをバイアル上でカチッと鳴らして取付ける。
- バイアルアダプタのキャップを取り外し、赤色マークと本品の赤色マークを合わせて接続する。
- バイアルアダプタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- バイアルを逆向きにして、バイアルから薬剤を吸引する。
- 薬剤吸引完了後、バイアルアダプタから本品を取り外す。

#### ②薬剤の調整及びバイアルへの移送

- 薬剤バッグ又は薬剤ボトルから調整用の溶解液を吸引する。
- 溶解液吸引完了後、バイアルアダプタをバイアル上でカチッと鳴らして取付け、キャップを取り外し、赤色マークと本品の赤色マークを合わせて接続する。
- バイアルアダプタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品からバイアルへ採取した溶解液を注入する。
- 溶解液とバイアル内の薬剤を混合し、溶解された薬剤を再度吸引する。
- 薬剤吸引完了後、バイアルアダプタから本品を取り外す。

#### 2. 薬液調整用器具「販売名：エクアシールド・スパイクアダプタ (届出番号 23B1X90001000015)」との接続方法

##### ①SA-1Tを使用する場合 (薬剤の注入専用)

- 薬剤バッグ又は薬剤ボトルに SA-1T を接続する。
- SA-1T のスパイクポートの蓋を外す。
- 本品の赤色マークと SA-1T の赤色マークを合わせて接続する。
- SA-1T に接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品から薬剤バッグ又は薬剤ボトルへ薬剤を注入する。
- 薬剤注入完了後、SA-1T から本品を外す。

##### ②SA-1Jを使用する場合 (薬剤の注入及び吸引両用、一部容器アダプタ

「販売名：エクアシールド・バイアルアダプタ (届出番号 23B1X90001000016)」を使用する)

- 薬剤ボトル又は薬剤バッグに SA-1J を接続する。
- 本品の赤色マークと SA-1J の赤色マークを合わせて接続する。
- 薬剤ボトル又は薬剤バッグから本品へ調整用の溶解液を吸引する。
- 溶解液吸引完了後、SA-1J から本品を外す。
- バイアルアダプタをバイアル上でカチッと鳴らして取付ける。
- バイアルアダプタのキャップを取り外し、赤色マークと本品の赤色マークを合わせて接続する。
- バイアルアダプタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。
- 本品からバイアルへ採取した溶解液を注入する。
- バイアル内の薬剤と溶解液を混合し、溶解された薬剤を再度吸引する。
- 薬剤吸引完了後、バイアルアダプタから本品を取り外す。
- 本品の赤色マークと SA-1J の赤色マークを再度合わせて接続する。
- 薬剤ボトル又は薬剤バッグへ溶解された薬剤を注入する。
- 注入完了後、SA-1J から本品を外す。

#### 3. 注射筒・針用アダプタ「販売名：エクアシールド・オスルーロックコネクタ (届出番号 23B1X90001000014)」との接続方法

●本品の赤色マークとオスルアーロックコネクタの赤色マークを合わせて接続する。

●オスルアーロックコネクタに接続中、ねじったり回転等をしないこと。

●本品を切り離す場合、オスルアーロックコネクタのロッキングレバーを押して取り外す。

4. 保護栓「販売名：エクアシールド・保護プラグ（届出番号 23B1X9000 1000012）」との接続方法

●本品の赤色マークと保護プラグの赤色マークを合わせて接続する。

●保護プラグに接続中、ねじったり回転等をしないこと。

●本品を切り離す場合、保護プラグを引っ張って取り外す。

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

●併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。

●適切に使用するために、本製品の使用方法を習熟した上で、施設の基準に従い使用すること。

●使用中は本製品の破損・接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。

●ひび割れを確認した場合、直ちに新しい製品と交換すること。

●接液部を汚染させないこと。

●使用直前に開封し、開封後は速やかに使用すること。

●包装が破損・汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】（自己認証による）

#### \*\*【包装】

SU-1: 15 個/箱

SU-3: 15 個/箱

SU-5: 15 個/箱

SU-10: 35 個/箱

SU-20: 30 個/箱

SU-35: 25 個/箱

SU-EZ60: 15 個/箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売業者】

アルゴキョウシステム株式会社

愛知県豊田市花園町屋敷 1 9 8 番地 2

TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528

ホームページ <http://www.argocs.com/>

##### 【製造業者】

Equashield Medical Ltd.（イスラエル）

エクアシールド メディカル Ltd.

##### \*【総代理店】

株式会社トーショー

東京都大田区東糞谷 3-8-8

TEL03-3745-1333 FAX03-3745-1547

ホームページ <http://www.tosho.co/>