


仕様

仕様項目		
名称	全自動散薬分包機 io-9090EX4	全自動錠剤散薬分包機 io-1620EX4
本体サイズ(mm)	W1150×D695×H908	W1300(1775)×D720×H2000 ※()はPC架台を含む寸法。 PC架台設置方向 左:W1825、右:W1775
設置有効面積(mm)	W1150×D695	
フロアプレートサイズ(mm)※	-	
本体重量(kg)	325	
電源	単相100VAC 20A 50/60Hz	
最大消費電力(W)	1700	
最大電流値(A)	17.2	
制御方法	分散CPU制御方式	
機械本体入力装置	タッチパネル式ノートPC標準装備(12.1インチTFTタッチパネル)	
外部入力装置	ノートPC卓 ALPHA-Wave標準装備	
錠剤棚	-	
最大投与日数	錠剤:1~255日 散薬:1~93包	
分包モード	錠剤・散薬・錠剤散薬混合・錠剤散薬交互・散薬錠剤交互・錠剤先行・散薬先行・特殊分包	
分割方法	片側・同時均等・不均等	
錠剤コンベア	48マスコンベアユニット標準装備	
予備撒きカセット	48マス手動式	
散薬配分方式	自動・手動選択方式(タッチパネル入力)	
散薬分割回数	1~93分割×2(R円盤方式)	
投入ホッパー数	2個(最大投入分量各280g程度/顆粒)	
散薬集積方式	スクレーパー方式	
包装機構	横型包装機	
プリンター	全行・2行印字対応熱転写方式 ※2行印字時は30mmリボンをご使用ください。	
分包紙サイズ(mm)	W80×H70固定	
分包速度	高速45包/分 低速38包/分(弊社測定フォームによる)	
集塵機	紙フィルター交換式ダストバック×3基	
ジャムリ検出	あり	
本体設置	壁付設置したまま散薬機上部の開閉可能 ※本体通気および電源ケーブルの経路を確保する為、壁から50mm以上開けての設置をお願いします。 ※io-1620EX4の場合は錠剤棚があるため、散薬機を手前に引き出してから開閉する必要があります。	

■寸法 単位:mm

io-9090EX4

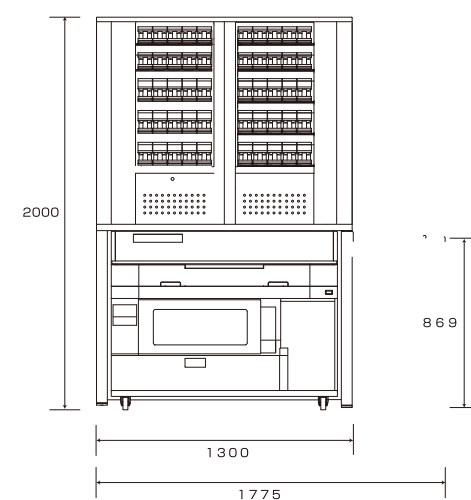

TOSHO
Your best pharmacy solution



全自動錠剤散薬分包機

io-1620EX4

長期投与を見すえた省スペース機。

EX4

io-9090EX4
io-1620EX4

錠剤分包機で培った技術を惜しみなく投入。

この一台で、錠剤も散薬も分包できる頼れる分包機です。

散薬と錠剤の一包装を省スペースで可能にしました。

メンテナンス・清掃性

毎日のお手入れだから、
よりお手入れしやすく。


新設計の上フレーム ヒンジ機構

上フレームは壁付けのまま開閉が可能なので、お手入れのために余計なスペースを必要としません。閉じる際にも手元で楽に解除できます。



錠剤棚

錠剤の落下経路には薬を割れにくくする特殊加工を施し、経路に付着した汚れは側面からダイレクトに清掃することができます。

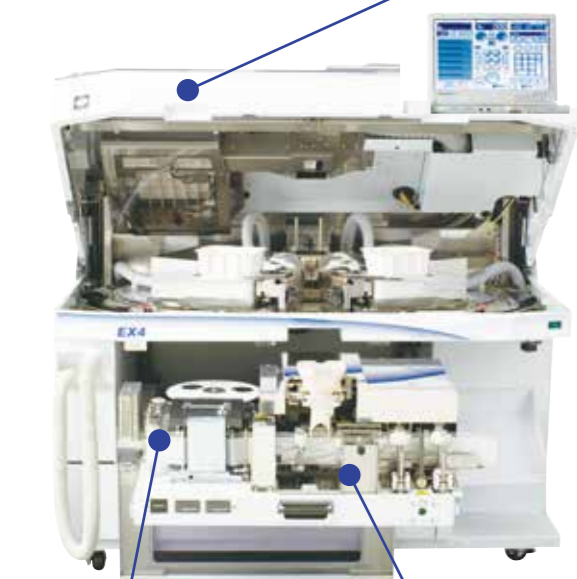

分包紙、インクリボンの交換

交換作業が容易なフルオープン設計です。また、操作卓では交換手順を説明した映像を見ることができ、はじめての方でも正しく作業できます。



脱着可能な紙・横ヒーター受け

シール機構のヒーター受けは包装機から取り外すことができ、かんたんにお手入れすることが可能です。



集塵機

集塵機は、長寿命、消音タイプを3基搭載。紙フィルターの交換も容易です。

全自動散薬分包機

io-9090EX4

最もスタンダードで、
最も洗練された散薬分包機。



毎日、そして何年にもわたって使う
分包機だからこそ、安心感と信頼性
をとことん追及しました。

「質実剛健」。

EX4 はそれを体現しています。

機能説明

2つのR円盤

精巧な技術から生産されたR円盤は、ベルト駆動により、滑らかな動きと静音性を実現しました。電磁フィーダーとスクレーパーユニットと連携し、高度な配分分割精度を実現しています。



タッチパネル式ノートPC

専用アプリケーションは、初めての方でも直感的に操作ができ、簡単、正確に処方入力が行えます。また、機能性、デザイン性に優れたトーション特注のPC 架台アームを採用しています。



錠剤カセット

錠剤カセットは、薬品に合わせてひとつひとつオーダーメイドで作成しています。極めて高い安定性を誇るカセットは視認性が高く、中の薬品残量を一目で確認することができます。また、棚は施錠も可能で、セキュリティにも配慮されています。(io-1620EX4のみ)
※カセットはSサイズ86個SSサイズ76個合計162個が搭載可能です。

48マス錠剤コンベアユニット

使用頻度の低い錠剤や半錠にカットされた薬品の分包ができ、分3処方方は最大16日間、分6処方方は最大8日間の投薬が一度に可能です。




進化し続ける横型包装機

多量分包を可能にした、引き出し式横型包装機。印字プリンターは、オンラインレイアウトが24個登録可能です。
※全行2行印字・熱転写方式



錠散一包装

錠剤と散薬の別包はもちろん、一包装を行うことも可能です。(io-1620EX4のみ)

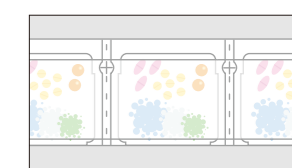

デザインシート

調剤室に、ちょっとしたあそび心を。

きっと、これまで以上に分包機が、楽しく身近な存在になります。

※詳細は弊社支店営業所までお問い合わせください。

白豹 (Snow Leopard)



たんぽぽ



パンダ



クマノミ実写

