

パラスター^{PAT}

さまざまな形状の薬品の除包作業を円滑に
調剤業務の効率アップをサポートします。

パラスターは、手動ハンドルを回すか、スイッチを押すだけの
簡単な操作で、素早い除包作業を実現しました。



N-2C ver.2 (コアモデル)



N-2CSM ver.2 (電動モデル)

高いスピード性能

手動なら1分間に100～150錠、
電動なら1分間に300～400錠を
除包可能です。(同一薬品使用時)



様々な薬剤に対応

手作業が負担となる小さな錠剤
や、カプセル錠やOD錠などの割
れや潰れが気になる錠剤も除包
可能です。^{※1}



低重心・ コンパクト設計

A4用紙が置けるスペースがあれば
設置可能なコンパクト設計で、
持ち運びも簡単です。
重心を低く設計し、機器越しの調
剤棚へのアクセスを向上しました。



簡単メンテナンス

マニュアルに沿った簡単なお手入れで、
機材を清潔に保てます。
また、アフターケアとしてオーバー
ホールも可能です。



※1 ソフトカプセル錠や一部のOD錠、薬品の形状やサイズによっては除包できないものがあります。
※ 手動の集塵機付きモデル (N-2CS ver.2) の取り扱いもあります。別途お問い合わせください。




仕様

仕様項目		
名称	パラスター®	
型式	N-2C ver.2 (コアモデル)	N-2CSM ver.2 (電動モデル)
本体サイズ※1	W310mm×D185mm×H245mm	W270mm×D240mm×H280mm
本体重量※2	約6kg	約10kg
除包方式	手動	電動
電源	なし	AC100V 50/60Hz
集塵機能	なし	50Hzの時 0.95m ³ /min 60Hzの時 1.10m ³ /min
最大消費電力	なし	50Hzの時 15.3w 60Hzの時 4w
除包能力量※3	100～150錠/min	300～400錠/min
対象薬剤	薬剤の高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠(一部OD錠・ソフトカプセル錠は除包できません)	
対象シート	薬剤間幅 最小21mm/最大55mmの2列シート(薬剤間幅は下図参照)	
付属品	専用トレイ・出口ガイド・防塵カバー	電源コード・専用トレイ・出口ガイド・防塵カバー
特許	PAT	

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含まれません。 ※2 薬品重量は含まれません。 ※3 同種薬剤を使用。

対象シート参考図

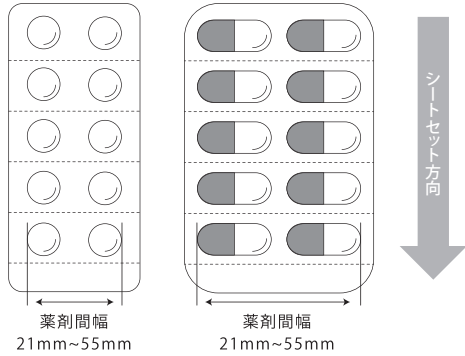


安全に関する注意


- 適用外のシートは使用しないでください。
対象外のシートを使用した場合、薬剤が欠けたりする場合がございます。
製品パンフレットに記載の「対象シート」項目をよくお読みください。
- 使用前に薬剤が対応できるか確認をお勧めします。
当社は製品の品質、信頼性や除包精度の向上に努めておりますが、PTPシートや薬剤の材質・形状により、シート片が落下したり、欠けたりする場合がございます。
除包したことのない薬剤については、除包前にはシート1、2枚で試すなど確認してからご使用になられることをお勧めします。
- 定期的に清掃をお願いします。
定期的に清掃をおこなわない場合、ローラー部の汚れやゴミの原因になりますので、メンテナンスマニュアルをご覧ください、定期的に清掃をおこなって頂きますよう、お願い申し上げます。
1～2年ごとにオーバーホールをご依頼いただくと、より清潔に、長く機器をご利用いただけます。
(オーバーホールの価格はお気軽にお問い合わせください)
- その他
出口ガイド部分などに、溶接加工時の溶接痕が残る場合がございます。(くすんだ斑点のようなもの)
品質に問題はございませんので、安心してご使用ください。
本製品を使用して除包した薬剤について、その品質を保障するものではありません。
薬剤の割れ・欠け・機械ゴミ・グリス等が付着していないことを必ず確認していただきますようお願いいたします。

寸法 単位[mm]

N-2C ver.2 (コアモデル)

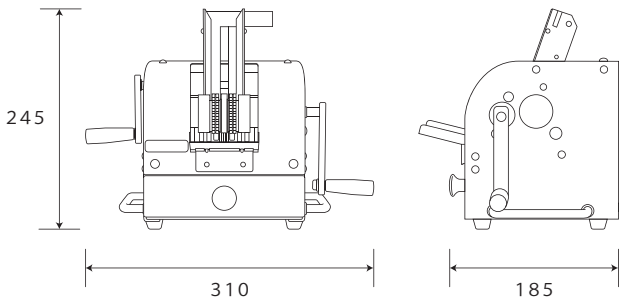

N-2CSM ver.2 (電動モデル)

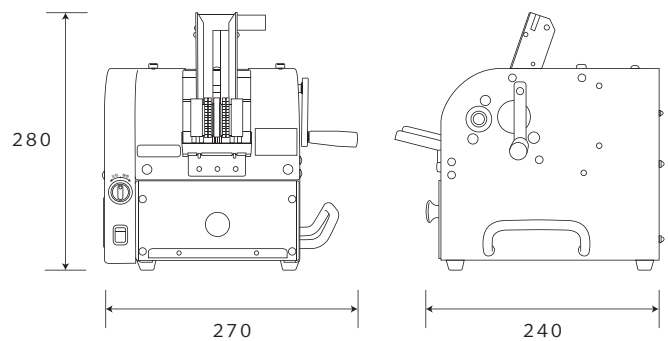

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2025年4月現在のものです。

■販売代理

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



■製造販売業者

 **中洲電機株式会社**
Nakasu

中洲電機株式会社
〒501-3803 岐阜県関市西本郷通7丁目5番33号
URL: <https://www.nakasudenki.com>