

型式	リテラシェルフ 2 Type1 LS2-2S2C	リテラシェルフ 2 Type2 LS2-7S
外形寸法	W570mm x D622mm x H1847mm	W570mm x D451mm x H1847mm
装置重量	181 kg	144 kg
消費電力 <sup>※1</sup>	本体 150VA 保冷庫 400VA	100VA
収納薬品形状 <sup>※2</sup>	アンプル・バイアル・プラアンプル	アンプル・バイアル・プラアンプル
カセットサイズ	3S・SS・S・M・L・LL・3L	3S・SS・S・M・L・LL・3L
収納可能アンプルサイズ <sup>※3</sup>	胴径：9mm～25mm / 高さ：45mm～130mm	胴径：9mm～25mm / 高さ：45mm～130mm
収納可能バイアルサイズ <sup>※3</sup>	胴径：15mm～50mm / 高さ：25mm～100mm	胴径：15mm～50mm / 高さ：25mm～100mm
収納可能プラアンプル <sup>※3</sup>	胴径：15mm～50mm / 高さ：25mm～100mm	胴径：15mm～50mm / 高さ：25mm～100mm
最大収納薬品種 <sup>※4</sup>	最大 60 種 (内 30 種が保冷庫内)	最大 105 種
カセットホルダー数 (トレー数)	4 枚	7 枚
プリンター棚	あり	なし
サービスコンセント	2口 (最大 100W)	なし
冷所保管機能	あり	なし

※1 タッチパネル、PCなどの制御機器、オプション機器の電力は含みません。


※2 カセットに直接入らない特殊形状の薬品用に、カセット充填用ケースもございます。

※3 薬品の胴径によっては、カセットの内寸調整用スペーサーを使用することがあります。


※4 カセットサイズ 3Sのみを使用した場合の数量です。

## ■ 寸法図

リテラシェルフ 2 Type1 LS2-2S2C

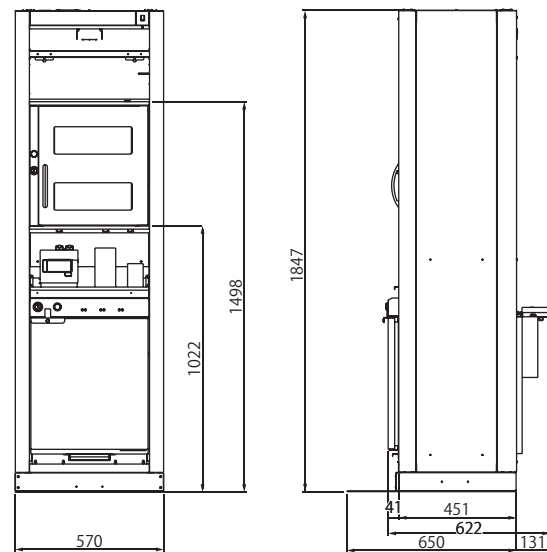

リテラシェルフ 2 Type2 LS2-7S

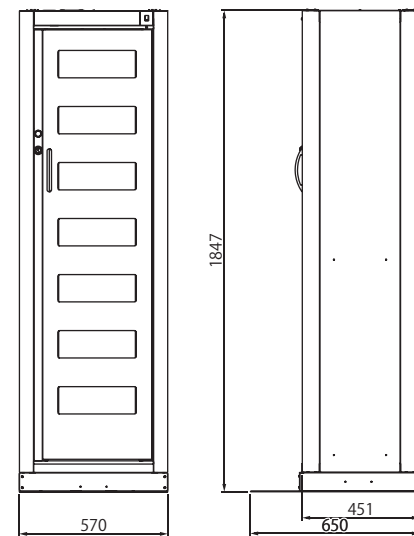

## 薬品管理装置

# LITERA II

薬品の取り出しと返却を自動カウント・自動記録  
リアルタイムの在庫管理を可能に



※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。  
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。  
※カタログ掲載内容は2024年5月現在のものです。

**TOSHO** 株式会社トーショー  
Your best pharmacy solution  
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8  
TEL: (03)3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶  
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。



## リテラ・ツール LITERA IIとは

リテラはカウント機能付きの薬品収納棚です。音声・画面警告、電磁ロックなどのセキュリティ機能で、定数配置薬の在庫管理、安全管理をサポートします。

## リテラの4つの特徴

01

### 在庫数をリアルタイムに把握

理論値のデータではなく、定数配置薬が使用されるタイミングでの実在庫数による管理が可能です。薬剤部の管理端末で在庫状況をリアルタイムにモニターできるため、薬品補充業務にもお役に立ていただけます。



03

### 他社システムとの連携 (オプション)

使用された薬品を手術ごとに集計し、手術部門システムへ送信することで請求漏れを防止でき、オーダーリングシステムとの連携で、最新オーダーに基づいた安全な薬品の取り揃えを可能にします。薬品、職員などのマスタ連携にも対応しています。



02

### 操作性


タッチパネルモニターを採用し、セキュリティ機能を保ちながらも、スピーディかつ直感的な操作が可能です。画面と音声によるガイダンス機能で正しい操作を促します。ログイン認証機器やバーコードスキャナにも対応しています。



04

### 耐久性

駆動部や消耗部品を最小限に抑え、耐久性に優れた装置構造となっていますので、長期間、安定した動作でお使いいただけます。※端末、ディスプレイ、バーコードスキャナなどの機器は定期的な更新が必要です。

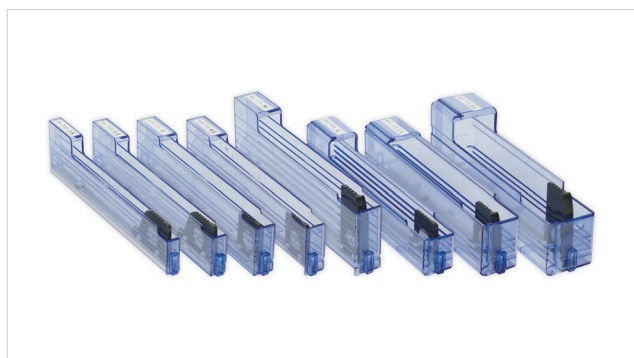


LITERA IIはニーズに合わせたユニットを選択いただけます。単体はもちろん、複数ユニットを組み合わせるの設置が可能。

#### ▶ 単体での構成

冷所薬品も管理したい!

TYPE1とPC

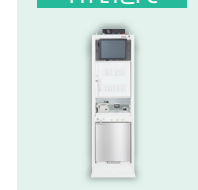

たくさん薬品を収納したい!

TYPE2とPC



#### ▶ 複数ユニットを組み合わせた構成

冷所薬品の収納を増やしたい!

TYPE1×2機とPC



薬品数が多く、管理が大変!

TYPE1×2機とTYPE2×3機とPC



## リテラの機能詳細

### 自動カウント機能

装置からの薬品の出入りを検知し、複数本、複数種の同時操作であっても追従し自動カウントします。装置起動時、起動前の在庫数との比較をおこないますので、装置停止中の在庫増減数をチェックできます。

時刻	区	部	部	品名(セット)名/規格名	種	数量	単位
09:18:23	病			オキタン	錠	1	A
09:18:26	病			生食20ml	1	A	
09:19:05	病			オキタン	錠	1	A

### セキュリティ

扉は電磁ロック方式を採用し、施錠/解錠状態はランプで目視確認ができます。扉の開閉状態を検知できるため、扉の閉め忘れを防止します。ICカード認証や生体認証でのログインにも対応しています。



### カセット/トレー棚

棚はトレー構造になっていて着脱が可能です。薬品を収納するカセットは、トレー上に最大15本セットすることができます。カセット方式のため、収納位置変更や後発薬品への配置換え対応が容易です。



### 集計/帳票発行

記録された薬品使用歴からさまざまな集計、帳票の発行が可能です。薬品の出入りに加え、操作歴も確認できますので、追跡調査などにお役に立ていただけます。運用に合わせた帳票のカスタマイズ(オプション)にも対応しています。

品名	品名	数量	単位	品名	数量	単位	
202209220001	オキタン	1	A	202209220001	オキタン	1	A
202209220001	オキタン	1	A	202209220001	オキタン	1	A